

## KARTA TECHNICZNA

**NDP MED KONCENTRAT**  
CERTYFIKAT CE 2004 110460 CP

JEST KOMPONENTEM BIOBÓJCZYM, KTÓRY NEUTRALIZUJE AKTYWNOŚĆ ENZYMÓW I KOENZYMÓW ŻYWYCH WE WSZYSTKICH MIKROORGANIZMACH.

### **APLIKACJA:**

DO ENDOSKOPII  
MATERIAŁÓW CHIRURGICZNO – LEKARSKICH  
URZĄDZEŃ CHIRURGICZNYCH  
INSTRUMENTÓW DO UROLOGII  
INSTRUMENTÓW DO TERAPII ODDECHOWEJ  
INSTRUMENTÓW DO NARKOZY I ZNIECZULANIA  
INSTRUMENTÓW STOMATOLOGICZNYCH  
SKALPELÓW, NOŻY, NOŻYC ORAZ WSZELKICH INSTRUMENTÓW  
STALOWYCH I Z TWORZYW

### **SKŁADNIKI CZYNNNE:**

N – DOUPROPENIDE – 22,76%  
AMINE TERTIARE 3 – AMINOPROPYL 5 – 10%

ŚRODEK NIE PALNY  
NIE MA ODDZIAŁYWANIA NA INNE MATERIAŁY  
NIE POWODUJE KOROZJI INSTRUMENTÓW  
NIE MODYFIKUJE STRUKTURY METALI, SZKŁA, POLIMERÓW,  
PLASTIKU

### **STABILNOŚĆ:**

ROZTWÓR STABILNY W TEMPERATURZE 10 - 30°C PRZEZ OKRES 30 DNI. KONCENTRAT STABILNY 2 LATA OD DATY PRODUKCJI. DATA PRZYDATNOŚCI PODANA NA NAKRĘTCE.

## **AKTYWNOŚĆ BIOBÓJCZA:**

BAKTERIOBÓJCZA            2%/20 ml. KONCENTRATU NA 0,98 L WODY    5 MINUT  
EN 1040, 1276, 13623

GRZYBOBÓJCZA            2%/20 ml. KONCENTRATU NA 0,98 L WODY    20 MINUT  
EN 1275,1650, AFNOR NFT72-200

WIRUSOBÓJCZA            2%/20 ml. KONCENTRATU NA 0,98 L WODY    5 MINUT  
HIV, HBV, POLIO 1, ADENO

PRĄTKOBÓJCZA            2%/20 ml. KONCENTRATU NA 0,98 L WODY    20 MINUT  
EN 14348                    3%/30 ml. KONCENTRATU NA 0,97 L WODY    15 MINUT

SPOROBÓJCZA            10%/100 ml. KONCENTRATU NA 0,9 L WODY    60 MINUT  
AFNOR NFT72-230

UŻYWAĆ W PODANYCH ROZTWORACH. DO ODMIERZONEJ ILOŚCI WODY (NAJLEPIEJ DESTYLOWANEJ) DODAC ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ KONCENTRATU I WYMIESZAĆ.

INSTRUMENTY PRZEZNACZONE DO DEZYNFEKCJI WSTĘPNIE UMYĆ, OPŁUKAĆ, EW. OCZYŚCIĆ Z RESZTEK MATERII ORGANICZNEJ, ZANURZYĆ W ROZTWORZE I POZOSTAWIĆ NA PODANY OKRES CZASU. OPŁUKAĆ W WODZIE DESTYLOWANEJ, NAJLEPIEJ SUSZYĆ METODĄ ASEPTYCZNA (POWIETRZEM POD CIŚNIENIEM)

## **OSTRZEŻENIA:**

PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ STOSOWANIA ORAZ KARTĘ CHARAKTERYSTYKI PRZED UŻYCIEM.

NIE UŻYWAĆ WIĘCEJ NIŻ **15 RAZY** (TEN SAM ROZTWÓR MOŻE BYĆ UŻYWANY DO 15 RAZY)

PO OTWARCIU BUTELKI KONCENTRAT POWINIEN BYĆ ZUŻYTY W CIĄGU 60 DNI

ROZTWÓR MOŻNA PRZECHOWYWAĆ DO 30 DNI

## **OZNAKOWANIA:**

X<sub>n</sub> – SZKODLIWY

R36/38 PODRAŻNIA OCZY I SKÓRĘ.

R22 NIEBEZPIECZNY W PRZYPADKU SPOŻYCIA.

S2/13 CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI, UNIKAĆ KONTAKTU Z ŻYWNOSCIĄ I NAPOJAMI.

S3/7/8 PRZECHOWYWAĆ W POJEMNIKACH ZAMKNIĘTYCH W MIEJSCU CHŁODNYM I SUCHYM.

S25 CHRONIĆ OCZY.

S26 W PRZYPADKU PODRAŻNIENIA OCZU PRZEMYĆ OBFICIE WODĄ I WEZWAĆ LEKARZA.

S36/37 UŻYWAĆ ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ  
W CELU UNIKNIĘCIA KONTAKTU PRODUKTU ZE SKÓRĄ.  
S49 PRZECHOWYWAĆ WYŁĄCZNIE W ORYGINALNYM  
OPAKOWANIU.